

PEU-ARIETTA60 据付要領書

INSTALLATION PROCEDURES

SSD-ARIETTA60 用生体信号ユニット
Physiological signal unit for SSD-ARIETTA60

この据付要領書は、PEU-ARIETTA60 の納品等の際、据付の資料としてご使用ください。
必要な工具: プラスドライバ、マイナスドライバ(あらかじめ用意すること)

These installation procedures are provided for reference in installation of PEU-ARIETTA60.
Tools required: Phillips-type screwdriver, Flat-bladed screw driver. (Prepare them beforehand)

注意

- 装置の据付作業は、有資格者に限られる。
- 装置を設置する場所の環境条件および電源設備は、取扱説明書の記載条件による。

CAUTION

- This system must be installed only by the qualified personnel.
- The environmental conditions for the place of installation and the specifications of the power supply must satisfy the requirements stated in the operator's manual.





Total Page : 8

付属品リスト

List of Accessory Parts

下記の付属品が揃っているか確認してください。

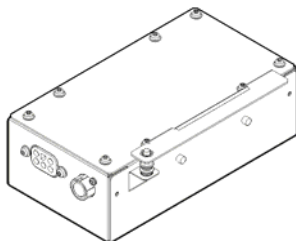Check all items listed below are included in the shipping case.

No.	品名 Parts Name	外観 Appearance	個数 Quantity
1	生体信号ユニット Physiological AMP unit PEU-AR60		1
2	ECG誘導コード ECG signal cord	 L-CABLE-674 L-CABLE-675 L-CABLE-676	1set
3	心電図クリップ電極 ECG clip electrode TE-43US	 1set : 3pcs. TE-43A (for Arms) 1pc. TE-43B (for Legs) 2pcs.	1
4	六角レンチ: Hexagonal wrench 対辺/ Size:4mm TWH-14		1

目次

CONTENTS

1. カバーの取り外し方法	1. Removing of Cover
2. 生体信号ユニットの取り付け方法	2. Installation of Physiological AMP Unit
3. アダプターの取り付け方法	3. Installation of adapter
4. 動作確認	4. Confirmation of the work
5. カバーの取り付け方法	5. Mounting of Cover

1. カバーの取り外し方法

1. Removing of Cover

バックカバーの取り外し方法 Removing of Back Cover

ローレットねじ, 2
Knurling Screws, 2

①




バックカバー下
Back Cover (lower)

① マイナスドライバーでローレットねじ 2 本を緩め、バックカバー下の上部を開く

② バックカバー下を上を持ち上げ取り外す。


① Loosen 2 knurling screws of the Back cover (lower) with the Flat-bladed screw driver, then open the top of it.

② Lift the Back Cover (lower), and remove it.

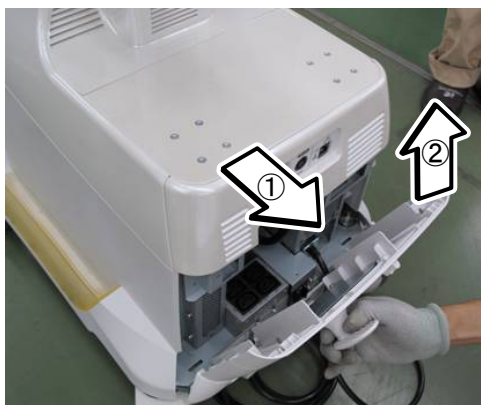

バックカバー上
Back Cover (upper)

③

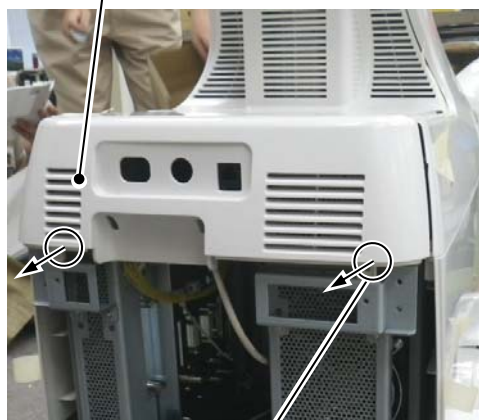


BNK3×8Fe-Ni, 2

③ ねじ 2 本を外し、バックカバー上を取り外す。

③ Unfasten 2 screws and remove the Back cover (upper).

生体目隠しラベルの取り外し方法 Removing of Blind Label (PEU)

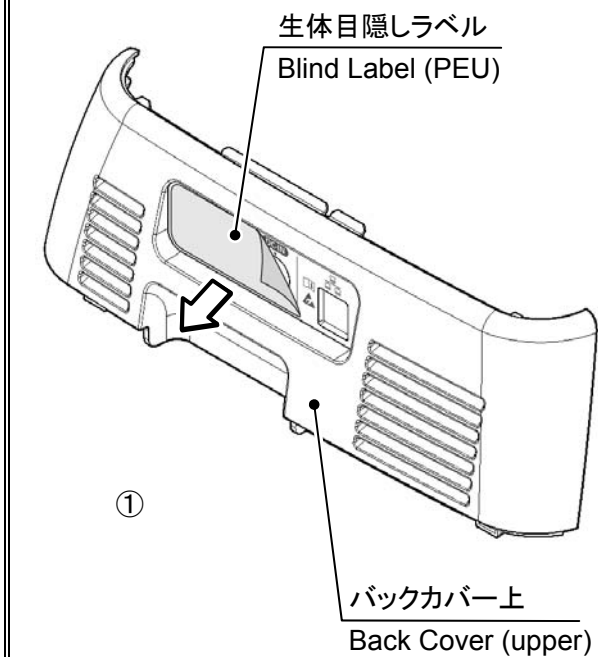

①バックカバー上より、生体目隠しラベルを剥がす。

①Remove the Blind label (PEU) on the Back Cover (Upper).

2. 生体信号ユニットの取付け方法


2. Installation of Physiological AMP Unit

生体信号ユニットの取付け方法

Installation of Physiological AMP Unit

BNK3×8 Fe-Ni, 2

①

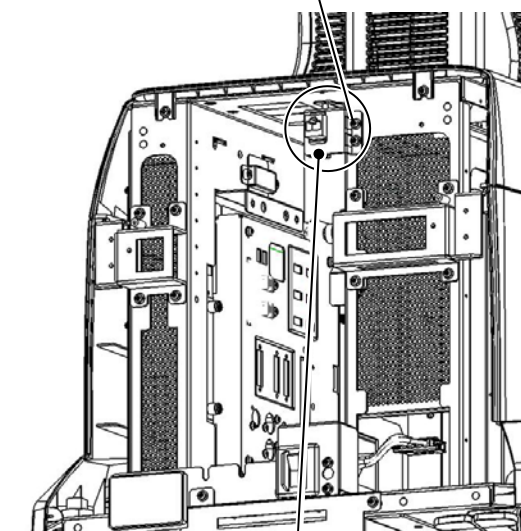


LANケーブル取付金具
LAN Cable Fixture

①ねじ 2 本を緩め、LAN ケーブル取付金具を取り外す。

①Loosen 2 screws and remove the LAN cable fixture.

②

HB4×8SUS, 2

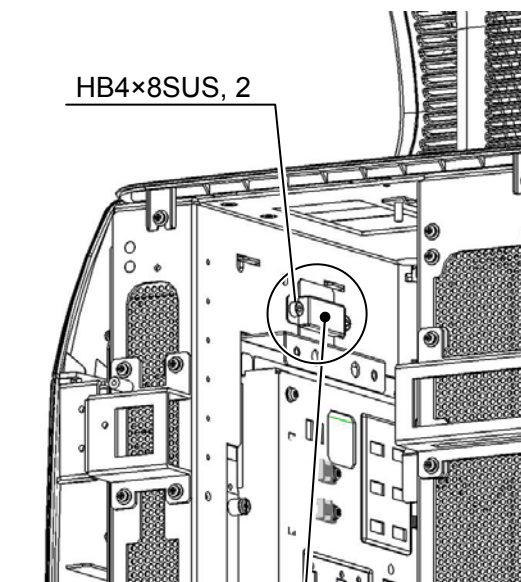

コネクタ目隠し金具
Connector Blind Fixture

②ねじ 2 本を外し、コネクタ目隠し金具をシャーシより取り外す。


※コネクタ目隠し金具及びねじは今後不要。

②Unfasten 2 screws and remove the connector blind fixture from the chassis.

NOTE: Not reuse 2 screws and connector blind fixture.

生体信号ユニット
Physiological AMP Unit


③

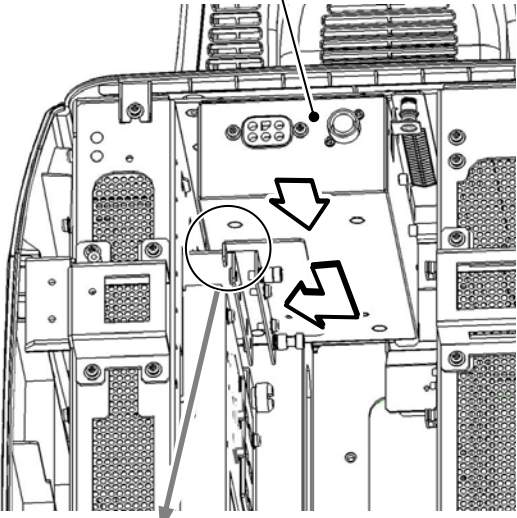

③ 生体信号ユニットを装置背面から、ユニット底面の曲げがシャーシに突き当たる所まで入れる。突き当たった状態で、BE基板側へスライドさせてコネクタを差し込む。

③ Insert the Physiological AMP unit from the equipment rear to the point where the bends plate of unit bottom collides with the chassis. Slide the Physiological AMP unit to the BE board side by colliding, and then insert the connector.


曲げ
Bends plate

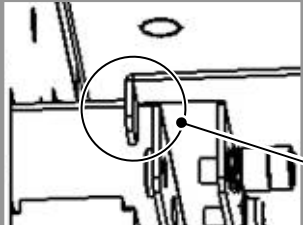

④

六角レンチ
Hexagonal wrench



※
NOTE:

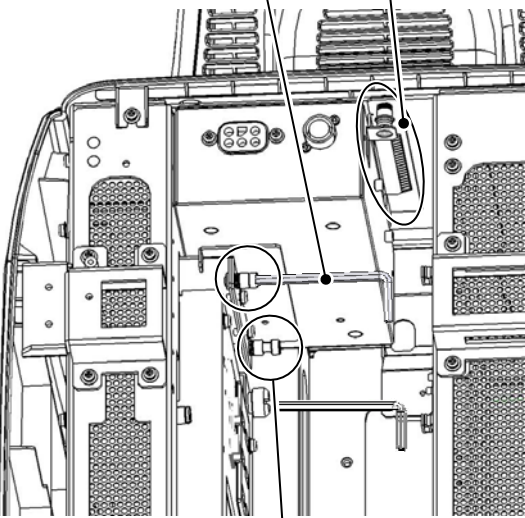

④ 付属の六角レンチで生体信号ユニット下のねじ 2本を締める。
※生体信号ユニットが装置の天板に引っかかっていることを確認すること。

④ Tighten 2 screws at under the Physiological AMP unit with the accessory hexagonal wrench.
NOTE: Confirm whether the Physiological AMP unit was hung to the upper chassis of equipment.

ねじ, 2
Screws, 2

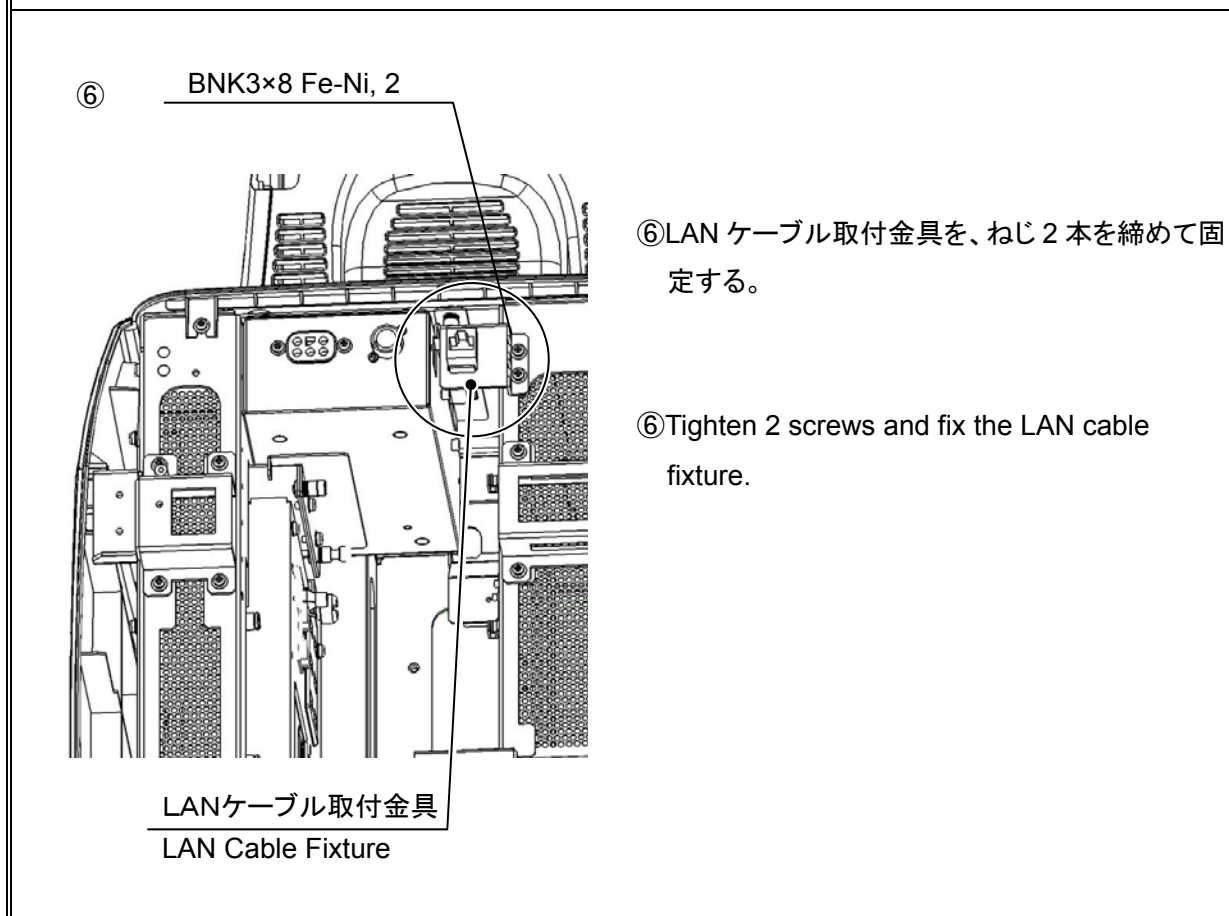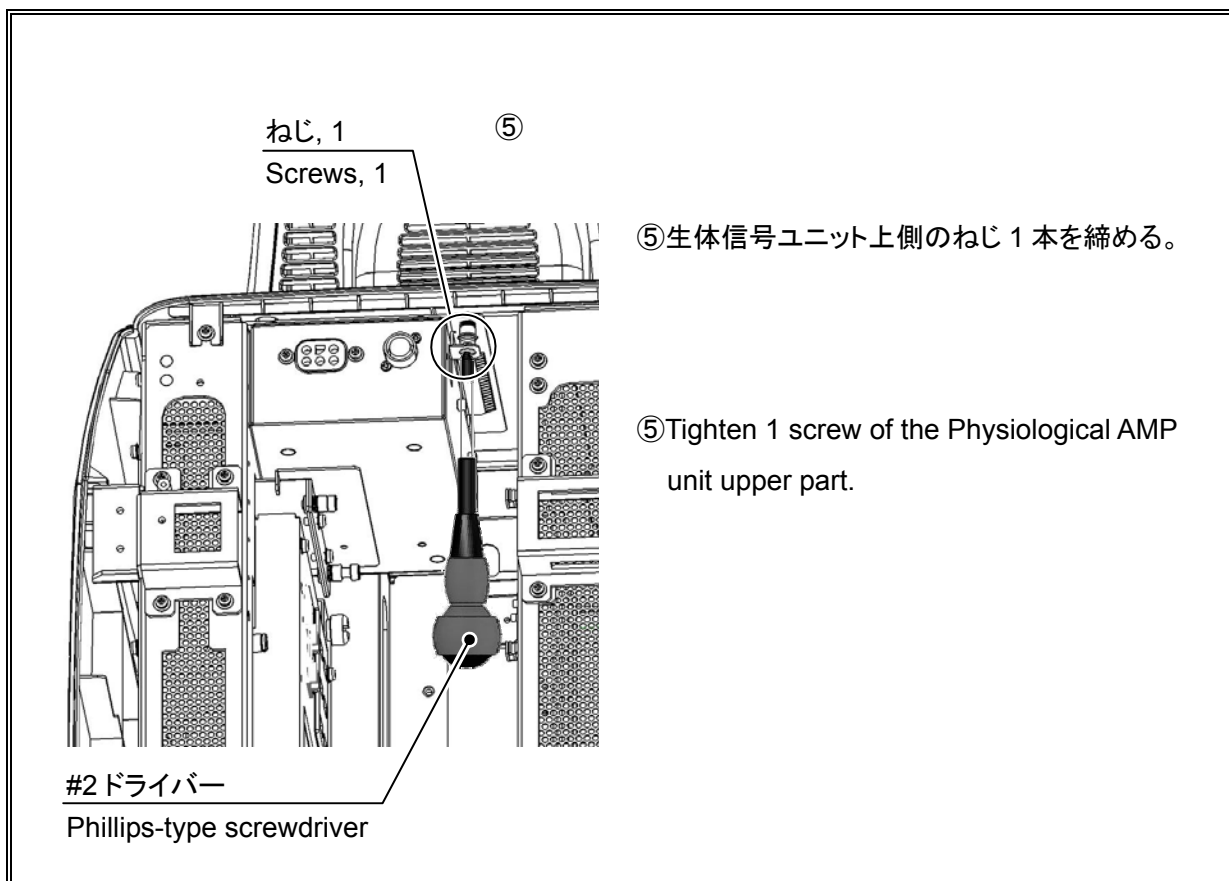

3. 動作確認

3. Confirmation of the work

①装置が正常に起動し、ECG 波形が表示されることを確認する。

※装置操作方法は取扱説明書を参照のこと。

①Confirm the following items.

- System boots normally.

- Displaying ECG wave.

NOTE: For the details of operation, refer to the instruction manual.

4. カバーの取り付け方法

4. Mounting of Cover

①カバールの取り外し方法と逆の手順で、カバーを取り付ける。

①Install the covers with the reverse procedure of Removing of cover.